

# FALLSCHUTZ- MATRATZE

Weiche Fallschutzmatratze, die schnell, einfach und platzsparend zusammengelegt werden kann.

Soft safety mattress, which can be fold fast, easy and space-saving.



**TEKVOR CARE**  
We care for you



CE



### **Maße (ausgebreitet):**

- Länge:
- Breite:
- Höhe:
- Gewicht:

### **Dimension (spread):**

- Length: 195 cm
- Width: 85 cm
- Height: 3 cm
- Weight: 5 kg

### **Montageanleitung:**

- Bei dem Anbringen der Fallschutzmatratze ist darauf zu achten, dass die Antirutsch-Unterseite auf dem Boden aufliegt.
- Die Fallschutzmatratze muss anschließend, mit Hilfe der drei Steckverschlüsse, am Bettgestell fixiert werden.

### ***Assembly instructions:***

- *You have to pay attention that the no-slip bottom lies on the floor, if you fix the safety mattress.*
- *With the three buckles you have to fix the safety mattress at the bedstead.*

### **Vorsichtsmaßnahmen:**

- Die Pflegepersonen dürfen die Fallschutzmatratze auf keinen Fall mit Schuhen begehen, da diese die Matratze oder den Bezug beschädigen könnten.
- Vor der Bodenreinigung muss die Fallschutzmatratze entfernt und weggeräumt werden.
- Ein Patient, der aus dem Bett gefallen ist, darf nicht langanhaltend auf der Fallschutzmatratze liegengelassen werden.

### ***Precautions:***


- *It is not allowed to walk on the safety mattress with shoes because it can damage the mattress or the cover*
- *The safety mattress has to remove away before you clean the floor*
- *A patient who falls out of the bed should not lie on the safety mattress for long time.*

### **Reinigungs- und Pflegehinweise**

- Der Bezug der Fallschutzmatratze ist vollständig abzieh- und waschbar.

### **Cleaning and Laundry instruction:**

- *The cover of the safety mattress is washable and you can complete take it off.*

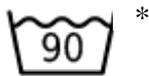

Waschtemperatur  
Maximale  
*Maximum washing  
temperature*



Chlorbleiche nicht  
möglich  
chlorine bleaching not  
possible



Schonend trocknen mit reduzierter  
thermischer Belastung (60°)  
Dry gently with reduced thermal  
load (60°C)



Nicht Bügeln  
Do not iron



Chemische Reinigung  
Chemical cleaning

\* Es wird ein Waschen bei 60°C empfohlen, um den optischen Eindruck lange beizubehalten.

\* We recommend washing at 60°C to maintain the optical impression for a long time.

### **Desinfektion:**

verdünnter Alkohol (bis zu 90%)  
sowie weitere Desinfektionsmittel  
die für die PVC geeignet sind.

### **Disinfection:**

*diluted alcohol (until 90%) as well as  
more disinfectants which are suitable  
for PVC.*

### **Materialzusammensetzung:**

- Viskoelastischer Schaumstoff mit Formgedächtnis RG 80kg/m<sup>3</sup>
- Pharmatex Inko-Bezug  
75% Polyurethan, 25% Polyester

### **Material composition:**

- *Viscoelastic memory foam  
RG 80k/m<sup>3</sup>*
- *Pharmatex incontinence  
cover 75% polyurethane,  
25% polyester*