

Paraply svart, incl. feste til TOPRO rullatorer

Umbrella black, incl. attachment for TOPRO rollators

Regenschirm schwarz, inkl. Halter-
ung für TOPRO Rollatoren

Innhold: 1 x 814068 Paraply svart
1 x 101550 Pose svart
1 x 814068M1 Monteringsanvisning

Content: 1 x 814068 Umbrella black
1 x 101550 Fabric bag black
1 x 814068M1 Mounting instructions

Inhalt: 1 x 814068 Regenschirm schwarz
1 x 101550 Tasche schwarz
1 x 814068M1 Montageanweisung

1



1. Fest paraplyen på høyre side av rullatoren.

1. *Mount the umbrella on the right side of the rollator.*
1. Den Schirm auf der rechten Seite des Rollators anbringen.

2



2. Juster paraplyen slik at den står loddrett og omtrent midt på rullatoren.

2. *Adjust the umbrella to the vertical position and to the middle of the rollator.*
2. Der Regenschirm soll senkrecht und ungefähr in der Mitte des Rollators eingestellt werden.

3



3. Når paraplyen ikke er i bruk kan den tas av, eller slås ned som vist på bilde.

3. *When the umbrella is not in use, it can be removed or fastened as shown in the picture.*
3. Ist der Schirm nicht im Gebrauch, kann er abgenommen oder wie gezeigt zusammengeklappt werden.

OBS! Ettermontert tilbehør kan gå utover produktets stabilitet og må brukes med forsiktighet.

Attention ! Accessories mounted on the rollator may influence the stability, we therefor advise you to use them carefully.

Achtung! Am Rollator montiertes Zubehör kann die Stabilität des Rollators beeinflussen. Wir empfehlen Ihnen daher, dieses sorgfältig einzusetzen.